



T:SLIM X2™ INSULINPUMPE

Jetzt mit Control-IQ+ Technologie

Zugelassen ab 2 Jahren

Lennon
2018 diagnostiziert

EINFACHER EINSTIEG



Erweiterte Anwendungsbereiche

- + Jetzt zugelassen für Kleinkinder ab 2 Jahren
- + Erweiterte Gewichtsindikation: 9–200 kg
- + Unterstützt eine Bandbreite an Insulin-Tagesdosen: 5–200 Einheiten



MEHR CGM-OPTIONEN

Neue Integration mit dem **Freestyle Libre 3 Plus** Sensor und bestehende Integration mit dem Dexcom G7 Sensor für die Nutzung mit dem vom Patienten bevorzugten Sensor.*



PROFILEINSTELLUNGS- RECHNER

Automatische Erstellung eines persönlichen Profils mit nur 2 Eingaben – dem **Gewicht** und der **Insulin-Tagesdosis** – für den leichteren Wechsel von mehreren täglichen Insulininjektionen (MDI/ICT) pro Tag zur Pumpentherapie.†

EINFACHE HANDHABUNG



Verlängerter Bolus für bis zu 8 Stunden

Unterstützt die Handhabung komplexer Mahlzeiten oder längerer Nahrungsaufnahmen im „Hybrid Closed Loop“.




EINFACHE PERSONALISIERUNG



Temporäre Basalrate bis zu 72 Stunden

Für das leichtere Management kurzzeitiger Veränderungen des Insulinbedarfs, wie bei Stress oder Erkrankungen, ohne neue Profile erstellen oder das persönliche Profil wechseln zu müssen.

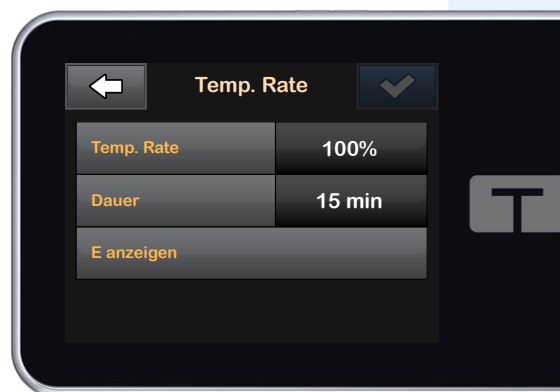

* CGM separat erhältlich. † Der Profileinstellungsrechner zieht die AACE-Leitlinien zur Festlegung der Pumpeneinstellung für Patienten heran, die von mehreren täglichen Injektionen wechseln. Wenn der Insulinbedarf von diesen Empfehlungen abweicht (d. h. niedrige Insulin-Tagesdosis, variabel im Tagesverlauf), wenden Sie sich bitte bezüglich Rat zu den anfänglichen Einstellungen an einen Arzt.

Dieses Medizinprodukt ist möglicherweise nicht für jede Person geeignet. Lesen Sie immer die Gebrauchsanweisung und befolgen Sie diese.

Wichtige Sicherheitsinformationen: Die t:slim X2 Insulinpumpe mit Control-IQ+ Technologie (das System) besteht aus der t:slim X2 Insulinpumpe, die die Control-IQ+ Technologie umfasst, und einem kompatiblen kontinuierlichen Glukosemonitor (CGM, separat erhältlich). Die t:slim X2 Insulinpumpe ist für die subkutane Abgabe von Insulin in festgelegten und variablen Raten zur Behandlung von Diabetes mellitus bei insulinpflichtigen Personen vorgesehen. Die t:slim X2 Insulinpumpe darf ausschließlich für die kontinuierliche Insulinabgabe und als Teil des Systems verwendet werden. Bei Verwendung mit einem kompatiblen CGM kann das System verwendet werden, um die Basalinsulinabgabe auf der Grundlage der CGM-Sensor-Messwerte und der vorausgesagten Glukosewerte automatisch zu erhöhen, zu verringern und zu unterbrechen. Das System kann auch Korrekturboli liefern, wenn prognostiziert wird, dass der Glukosewert einen vordefinierten Schwellenwert überschreitet. Die Pumpe und das System sind indiziert zur Anwendung bei Personen ab 2 Jahren. Die Pumpe und das System sind für die Verwendung durch einen Einzelanwender bestimmt. Die Pumpe und das System sind für die Verwendung mit NovoLog/NovoRapid, Lyumjev, Admelog, Trurapi oder Humalog U-100 Insulin bestimmt, je nach der spezifischen Zulassung im Land. Die Pumpe ist indiziert zur Anwendung bei Personen ab 2 Jahren. Control-IQ+ Technologie: Die Control-IQ+ Technologie ist für das Management von Typ-1-Diabetes mellitus bei Personen ab 2 Jahren bestimmt.

WARNHINWEIS: Die Control-IQ+ Technologie sollte nicht bei Personen unter 2 Jahren mit Typ-1-Diabetes verwendet werden. Sie sollte auch nicht bei Patienten eingesetzt werden, die weniger als eine Tages-Insulindosis von 5 Einheiten benötigen, und nicht bei Personen, die weniger als 9 Kilogramm wiegen; dies sind die erforderlichen Mindestwerte für einen sicheren Betrieb von Control-IQ+.

Das System ist nicht zur Anwendung bei Schwangeren, Dialysepatienten oder schwer kranken Anwendern zugelassen. Verwenden Sie das System nicht bei Anwendung von Hydroxycarbamid. Anwender der Pumpe und von Control-IQ+ müssen: die Insulinpumpe, iCGM und alle anderen Systemkomponenten gemäß der jeweiligen Gebrauchsanweisung verwenden. Wenn diese Anweisungen nicht beachtet werden, kann zu viel oder zu wenig Insulin abgegeben werden. Dies kann Hypoglykämie (niedriger Blutzucker) oder Hyperglykämie (hoher Blutzucker) verursachen. Weitere wichtige Sicherheitsinformationen finden Sie unter tandemdiabetes.com/safetyinfo.

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Tandem Diabetes Care, die Tandem Logos, t:slim X2 und Control-IQ+ sind eingetragene Marken oder Marken von Tandem Diabetes Care, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Dexcom, Dexcom G7 sowie alle zugehörigen Logos und Bildmarken sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Dexcom, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Das Sensorgehäuse, FreeStyle, Libre und verbundene Marken sind Marken von Abbott und werden mit freundlicher Genehmigung verwendet. Alle anderen Marken Dritter gehören den jeweiligen Eigentümern. MAT 1465_1