



Automatisches Abschalten des Sensors

Der FreeStyle Libre 3 Plus Sensor ist für eine Tragedauer von bis zu 15 Tagen ausgelegt. Der Bildschirm „Sensor läuft bald ab“ wird auf der Pumpe angezeigt und informiert den Benutzer darüber, wie viel Zeit in der Sensor-Sitzung zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM) noch verbleibt.

Der Benutzer hat die Möglichkeit, die Sensor-Sitzung vor Ablauf manuell zu beenden oder ein automatisches Abschalten des Sensors zu veranlassen.



Manuelles Abschalten



Diese Anleitungen zeigen Pumpenbenutzern, wie eine **FreeStyle Libre 3 Plus** Sensor-Sitzung manuell beendet werden kann.



1 Tippen Sie im Startbildschirm auf **OPTIONEN**. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil und anschließend auf **Mein CGM**.



2 Tippen Sie auf **SENSOR STOPPEN**.



3 Tippen Sie auf ☒, um zu bestätigen, dass Sie die aktuelle Sensor-Sitzung beenden möchten.



4 Tippen Sie auf ☒, um zu bestätigen, dass die Sitzung nicht neu gestartet werden kann.



5 Es wird der Startbildschirm mit dem Symbol „Sensor austauschen“ angezeigt.

Restliche Sensorzeit

Benutzer können während der Sensor-Sitzung jederzeit nachsehen, wann die Sensor-Sitzung gestartet wurde und wie viel Zeit noch übrig ist. Tippen Sie im Startbildschirm auf das Symbol für die Insulinmenge und anschließend zweimal auf den Abwärtspfeil.

Benutzer können außerdem die restliche Zeit ihrer Sensor-Sitzung sowie Warnmeldungen „Sensor läuft bald ab“ in der Tandem t:slim Mobile App sehen.



Weitere Ressourcen finden Sie auf de.vitalaire.com/diabetes.

Diese Anleitungen sind als Referenz für Personen bestimmt, die bereits mit der Verwendung einer Insulinpumpe von Tandem Diabetes Care vertraut sind. Es sind nicht alle Bildschirme abgebildet. Ausführlichere Informationen zur Bedienung der t:slim X2 Pumpe finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

Wichtige Sicherheitshinweise: Tandem-Insulinpumpen sind für die subkutane Abgabe von Insulin mit festgelegter und variabler Abgaberate zur Behandlung von Diabetes mellitus bei insulinpflichtigen Personen bestimmt. Weitere wichtige sicherheitsbezogene Hinweise finden Sie auf tandemdiabetes.com/safetyinfo.

WARNHINWEIS: Die Control-IQ+-Technologie sollte nicht bei Personen unter 2 Jahren mit Typ-1-Diabetes angewendet werden. Sie sollte außerdem nicht bei Patienten angewendet werden, die eine Gesamtinsulindosis von weniger als 5 Einheiten Insulin pro Tag benötigen oder weniger als 9 Kilogramm wiegen, da dies die erforderlichen Mindestwerte für den sicheren Betrieb von Control-IQ+ sind.

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Tandem Diabetes Care, die Tandem-Logos, t:slim, t:slim X2 und Control-IQ+ sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Tandem Diabetes Care, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Das Sensorgehäuse, FreeStyle, Libre und zugehörige Marken sind Eigentum von Abbott, und ihre Verwendung ist genehmigungspflichtig. Alle Marken Dritter sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. MAT-0906_1