




Setzen Sie einen neuen **FreeStyle Libre 3 Plus** Sensor ein und verbinden Sie die Tandem t:slim Mobile App mit der t:slim X2 Insulinpumpe, bevor Sie mit diesen Schritten beginnen.



Benutzer mit iOS-Betriebssystem: Fahren Sie mit Schritt 4 fort. Benutzer mit Android-Betriebssystem: Tippen Sie im Startbildschirm des Smartphones auf **Einstellungen**.

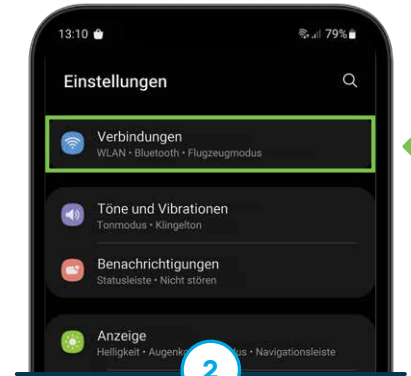


Tippen Sie auf **Verbindungen**, um fortzufahren.




Stellen Sie sicher, dass **NFC und kontaktloses Bezahlen** aktiviert ist.




Tippen Sie in der Navigationsleiste der Tandem t:slim Mobile App auf **Einstellungen**.

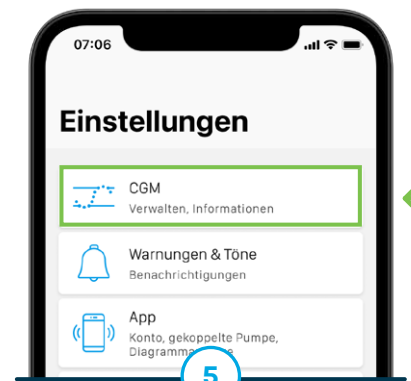


Tippen Sie auf **CGM** und dann auf **FreeStyle Libre 3 Plus**, um fortzufahren.

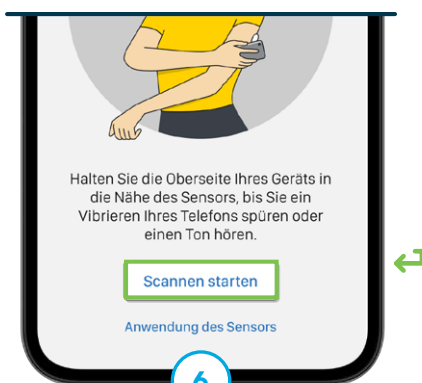

Benutzer mit Android-Betriebssystem: Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Benutzer mit iOS-Betriebssystem: Tippen Sie auf **Scannen starten**, um fortzufahren.

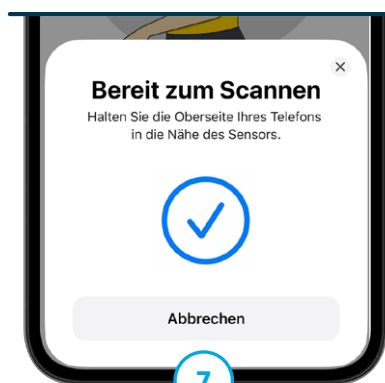

Halten Sie die Oberseite (iOS) bzw. Rückseite (Android) des Smartphones an den Sensor, bis dieser vibriert oder ein Signalton ertönt.

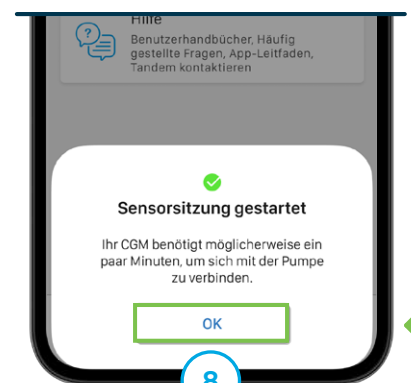

Es wird der Bildschirm **Sensorsitzung gestartet** angezeigt. Tippen Sie auf **OK**.

Starten einer Sensor-Sitzung (Forts.)



Es werden ein CGM-Trenddiagramm und ein Symbol für einen 1-Stunden-Countdown für den Sensorstart angezeigt.



Das Symbol füllt sich mit der Zeit, um anzuzeigen, wie viel Zeit noch übrig ist.



Sobald der Startvorgang abgeschlossen ist, wird die neue Sitzung gestartet.

Weitere Ressourcen finden Sie auf de.vitalaire.com/diabetes.

Diese Anleitungen sind als Referenz für Personen bestimmt, die bereits mit der Verwendung einer Insulinpumpe von Tandem Diabetes Care vertraut sind. Es sind nicht alle Bildschirme abgebildet. Ausführlichere Informationen zur Bedienung der t:slim X2 Pumpe finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

Wichtige Sicherheitshinweise: Tandem-Insulinpumpen sind für die subkutane Abgabe von Insulin mit festgelegter und variabler Abgaberate zur Behandlung von Diabetes mellitus bei insulinpflichtigen Personen bestimmt. Weitere wichtige sicherheitsbezogene Hinweise finden Sie auf tandemdiabetes.com/safetyinfo.

WARNHINWEIS: Die Control-IQ+-Technologie sollte nicht bei Personen unter 2 Jahren mit Typ-1-Diabetes angewendet werden. Sie sollte außerdem nicht bei Patienten angewendet werden, die eine Gesamtinsulindosis von weniger als 5 Einheiten Insulin pro Tag benötigen oder weniger als 9 Kilogramm wiegen, da dies die erforderlichen Mindestwerte für den sicheren Betrieb von Control-IQ+ sind.

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Tandem Diabetes Care, die Tandem-Logos, t:slim, t:slim X2 und Control-IQ+ sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Tandem Diabetes Care, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Das Sensorgehäuse, FreeStyle, Libre und zugehörige Marken sind Eigentum von Abbott, und ihre Verwendung ist genehmigungspflichtig. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Android ist eine Marke der Google LLC. MAT-0909_1